


MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

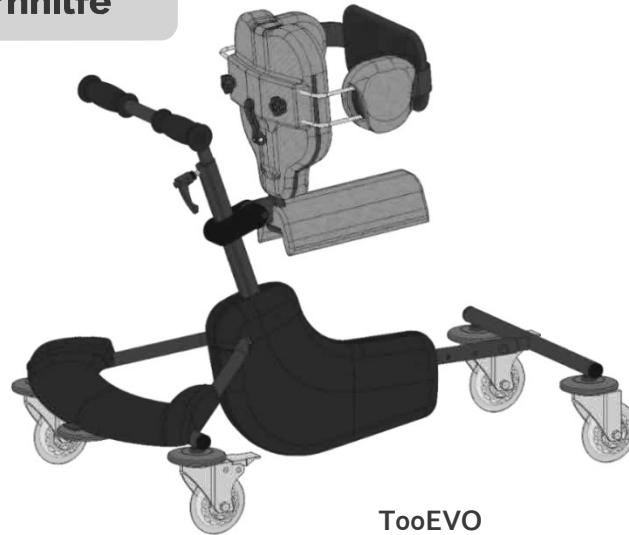

TooEVO



Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen vor Verwendung	2
Zweck und Hinweise	2
Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen	5
Aufbau der Vorrichtung	5
Einrichten für den ersten Gebrauch	6
Zusammensetzung des Geräts	7
Zubehör	10
Gebrauchsanweisung	11
<i>Anbringung des Sattelkorsetts am Rahmen:</i>	11
<i>Patienten auf die Vorrichtung setzen:</i>	12
<i>Einstellung der Rahmenlänge:</i>	13
<i>Einstellung des Lenkers:</i>	14
<i>Sattelhöheneinstellung für den Patienten:</i>	14
<i>Einstellung der Neigung des Patienten:</i>	15
<i>Einstellung der vorderen Pelotte:</i>	17
<i>Einstellung der lateralen Thoraxpelotten:</i>	17
<i>Montage und Einstellung der optionalen starren Rückenstütze:</i>	18
<i>Montage und Einstellung des optionalen Beinseparators:</i>	20
<i>Montage und Einstellung der optionalen Kopfstütze:</i>	21
<i>Montage der optionalen Schiebestange:</i>	22
<i>Montage des optionalen Armauflagenpaars:</i>	22
<i>Montage der optionalen Räder mit Lenkstopp:</i>	22
Instandhaltung	22
Wiederverwendung	26
Gewährleistung und Haftung	27
Gesetzliche Informationen	27
Symbole	27
NOTIZEN	28



Voraussetzungen vor Verwendung

Diese Packungsbeilage ist für Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt.

- Dieses Dokument ist vor dem Einsatz der Vorrichtung aufmerksam zu lesen.
- Die Sicherheitsempfehlungen sind einzuhalten, um Verletzungen des Patienten und/oder Beschädigungen der Vorrichtung zu vermeiden.
- Patienten und Nutzer/Begleitpersonen müssen über den korrekten Gebrauch der Vorrichtung und die Sicherheitshinweise informiert werden.
- Das Symbol  warnt vor Risiken wie einer Verletzung des Patienten oder einer Beschädigung des Produkts.
- Der Rahmen ist vom Orthopädietechniker zusammenzusetzen. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit **vor** jeder Montagearbeit.

Einsatzbedingungen: Diese Vorrichtung ist für den Innenbereich bestimmt. Sie kann von mehreren Patienten nacheinander verwendet werden, sofern sie die zulässigen Gewichtsgrenzen der Lauflernhilfe einhalten. Die Einstellungen auf den Körperbau müssen durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal an der Lauflernhilfe vorgenommen werden (siehe Abschnitt „Einstellungen“), bevor sie der Patient verwenden kann.

Einsatzdauer: In Anbetracht der Stabilität und des Designs der Vorrichtung ist eine sorgfältige Sicht- und Funktionskontrolle des Geräts vor seiner Verwendung durchzuführen, damit Anzeichen von Materialverschleiß erkannt werden, die seiner Verwendung entgegenstehen würden (siehe Abschnitt „Wartung“). Solche Prüfungen bilden die beste Methode, die Nutzungsdauer dieses Medizinprodukts zu überwachen und seine Weiterverwendung (Aufrechterhaltung der Nutzung) sicherzustellen. Die Nutzungsdauer des Produkts wird bei normalem Gebrauch auf 5 Jahre geschätzt.

Zweck und Hinweise

Modulare Lauflernhilfe mit Größenanpassung zur Unterstützung von Patienten mit infantiler Zerebralparese oder Mehrfachbehinderung, die eine komplexe Haltungsunterstützung benötigen. Die Indikation wird medizinisch-orthopädisch begleitet.

TooEVO-300-1NNBL: MOTILO EVO T1 (Gewicht der Vorrichtung: 10,5 kg).


TooEVO-300-2NNBL: MOTILO EVO T2 (Gewicht der Vorrichtung: 14,4 kg).

Art	Einstellungen	Gewichts-, Größen- und Altersbeschränkung
Modulare Lauflernhilfe mit Größenanpassung	Höhe, Sattelnäigung, Höhe und Neigung des Lenkers.	T1 Gewichtsbeschränkung für den Patienten: 20 kg Größenbeschränkung: 1,20 m Altersbeschränkung: 4-8 Jahre*
		T2 Gewichtsbeschränkung für den Patienten: 35 kg Größenbeschränkung: 1,40 m Altersbeschränkung: 7-12 Jahre*

*Zur Orientierung

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

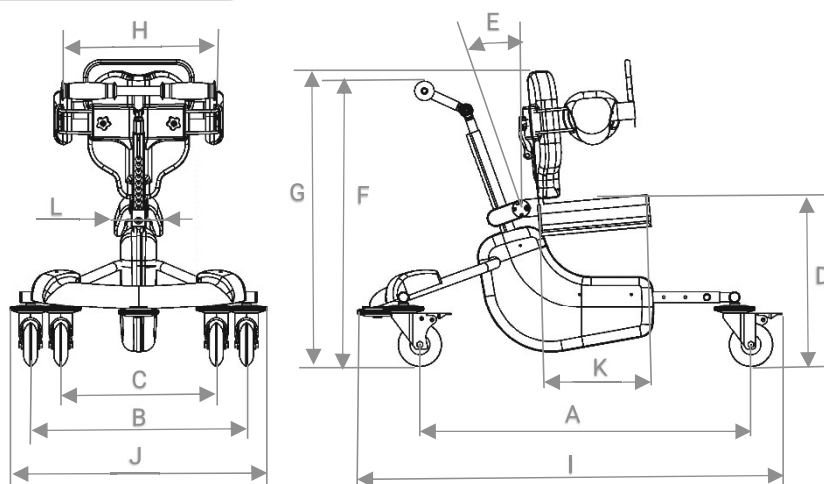

Abmessungen T1

Länge (A) :	765mm bis 865mm	Wendekreis:	1060 mm
Breite vorn (B) :	500mm	Reifenbreite	24mm
Breite hinten (C) :	360mm	Raddurchmesser:	100 mm
Höhe zwischen Boden und Schritt (D) :	360mm bis 515mm	Gewicht der Vorrichtung:	10.50 Kg
Neigung (E) :	60° bis 90°	Gewicht mit Zubehör:	15.60 Kg
Lenkerhöhe (F) :	640mm bis 880mm	Max. Benutzergewicht:	20 Kg
Höhe Stütze vorn (G) :	645mm bis 905mm	Größenbeschränkung:	0.9m bis 1.2m
Lenkerbreite (H) :	350mm		
Platzbedarf (I) :	1050mm bis 1150mm		
Platzbedarf (J) :	595mm		
Sitztiefe (K) :	258mm		
Sitzbreite (L) :	111mm		


Abmessungen T2

Länge (A) :	900mm bis 1000mm	Wendekreis:	1220 mm
Breite vorn (B) :	600mm	Reifenbreite	24mm
Breite hinten (C) :	430mm	Raddurchmesser:	100 mm
Höhe zwischen Boden und Schritt (D) :	495mm bis 650mm	Gewicht der Vorrichtung:	14.40 Kg
Neigung (E) :	60° bis 90°	Gewicht mit Zubehör:	19.50 Kg
Lenkerhöhe (F) :	785mm bis 970mm	Max. Benutzergewicht:	35 Kg
Höhe Stütze vorn (G) :	770mm bis 1020mm	Größenbeschränkung:	1.1m bis 1.4m
Lenkerbreite (H) :	450mm		
Platzbedarf (I) :	1130mm bis 1230mm		
Platzbedarf (J) :	695mm		
Sitztiefe (K) :	258mm		
Sitzbreite (L) :	111mm		

Art der Bestandteile:

- Stahlrahmen pulverbeschichtet (Lackierung)
- Polsterung aus Evazote-Schaumstoff.
- Rad mit Polyurethanreifen

Strukturierung der Referenzierung :

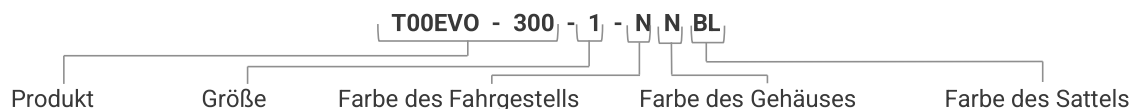

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

Verfügbare Rahmenfarben:

B: Blau / BL: Blau Janton / N: Schwarz / R: Rot / RS: Rosa / V: Grün / VI: Violett

Verfügbare Gehäusefarben :

B: Weiß / J: Gelb / N: Schwarz / R: Rot

Verfügbare Sattelfarben :

BL: Blau

REFERENZ T1	BESCHREIBUNG	FARBEN
T00EVO-300-1BJBBL	MOTILO EVO T1 BJ weißes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BJJBL	MOTILO EVO T1 BJ gelbes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BJNBL	MOTILO EVO T1 BJ schwarzes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BJRBL	MOTILO EVO T1 BJ rotes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BLBBL	MOTILO EVO T1 BLAU weißes Gehäuse	Blaues Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BLJBL	MOTILO EVO T1 BLAU gelbes Gehäuse	Blaues Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BLNBL	MOTILO EVO T1 BLAU schwarzes Gehäuse	Blaues Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1BLRBL	MOTILO EVO T1 BLAU rotes Gehäuse	Blaues Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1NBBL	MOTILO EVO T1 SCHWARZ weißes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1NJBL	MOTILO EVO T1 SCHWARZ gelbes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1NNBL	MOTILO EVO T1 SCHWARZ schwarzes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1NRBL	MOTILO EVO T1 SCHWARZ rotes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RBBL	MOTILO EVO T1 ROT weißes Gehäuse	Rotes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RJBL	MOTILO EVO T1 ROT gelbes Gehäuse	Rotes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RNBL	MOTILO EVO T1 ROT schwarzes Gehäuse	Rotes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RRBL	MOTILO EVO T1 ROT rotes Gehäuse	Rotes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RSBBL	MOTILO EVO T1 ROSA weißes Gehäuse	Rosa Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RSJBL	MOTILO EVO T1 ROSA gelbes Gehäuse	Rosa Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RSNBL	MOTILO EVO T1 ROSA Geh schwarzes Gehäuse	Rosa Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1RSRBL	MOTILO EVO T1 ROSA rotes Gehäuse	Rosa Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VIBBL	MOTILO EVO T1 VIOLETT weißes Gehäuse	Violettes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VIJBL	MOTILO EVO T1 VIOLETT gelbes Gehäuse	Violettes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VINBL	MOTILO EVO T1 VIOLETT schwarzes Gehäuse	Violettes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VIRBL	MOTILO EVO T1 VIOLETT rotes Gehäuse	Violettes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VBBBL	MOTILO EVO T1 GRÜN weißes Gehäuse	Grünes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VJBL	MOTILO EVO T1 GRÜN gelbes Gehäuse	Grünes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VNBL	MOTILO EVO T1 GRÜN schwarzes Gehäuse	Grünes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-1VRBL	MOTILO EVO T1 GRÜN rotes Gehäuse	Grünes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle

REFERENZ T2	BESCHREIBUNG	FARBEN
T00EVO-300-2BJBBL	MOTILO EVO T2 BJ weißes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BJJBL	MOTILO EVO T2 BJ gelbes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BJNBL	MOTILO EVO T2 BJ schwarzes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BJRBL	MOTILO EVO T2 BJ rotes Gehäuse	Blaues Gestell JANTON / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BLBBL	MOTILO EVO T2 BLAU weißes Gehäuse	Blaues Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BLJBL	MOTILO EVO T2 BLAU gelbes Gehäuse	Blaues Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BLNBL	MOTILO EVO T2 BLAU schwarzes Gehäuse	Blaues Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2BLRBL	MOTILO EVO T2 BLAU rotes Gehäuse	Blaues Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2NBBL	MOTILO EVO T2 SCHWARZ weißes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2NJBL	MOTILO EVO T2 SCHWARZ gelbes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2NNBL	MOTILO EVO T2 SCHWARZ schwarzes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2NRBL	MOTILO EVO T2 SCHWARZ rotes Gehäuse	Schwarzes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RBBL	MOTILO EVO T2 ROT weißes Gehäuse	Rotes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RJBL	MOTILO EVO T2 ROT gelbes Gehäuse	Rotes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RNBL	MOTILO EVO T2 ROT schwarzes Gehäuse	Rotes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RRBL	MOTILO EVO T2 ROT rotes Gehäuse	Rotes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RSBBL	MOTILO EVO T2 ROSA weißes Gehäuse	Rosa Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RSJBL	MOTILO EVO T2 ROSA gelbes Gehäuse	Rosa Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RSNBL	MOTILO EVO T2 ROSA Geh schwarzes Gehäuse	Rosa Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2RSRBL	MOTILO EVO T2 ROSA rotes Gehäuse	Rosa Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VIBBL	MOTILO EVO T2 VIOLETT weißes Gehäuse	Violettes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VIJBL	MOTILO EVO T2 VIOLETT gelbes Gehäuse	Violettes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VINBL	MOTILO EVO T2 VIOLETT schwarzes Gehäuse	Violettes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VIRBL	MOTILO EVO T2 VIOLETT rotes Gehäuse	Violettes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VBBBL	MOTILO EVO T2 GRÜN weißes Gehäuse	Grünes Gestell / Weiße Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VJBL	MOTILO EVO T2 GRÜN gelbes Gehäuse	Grünes Gestell / Gelbe Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VNBL	MOTILO EVO T2 GRÜN schwarzes Gehäuse	Grünes Gestell / Schwarze Carter / Blaue Hülle
T00EVO-300-2VRBL	MOTILO EVO T2 GRÜN rotes Gehäuse	Grünes Gestell / Rote Carter / Blaue Hülle

Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen

-  Sturzgefahr bei Überlastung.
Bitte halten Sie die empfohlenen Größen- und Gewichtsbeschränkungen ein.
-  Sturzgefahr bei unsachgemäßer Befestigung des Sattels auf dem Rahmen.
Halten Sie sich an die Montageanweisungen und überprüfen Sie die ordnungsgemäße Befestigung des Sattels am Rahmen.
-  Sturzgefahr bei Verlust der Verbindungsstabilität der Rückenstütze.
Montagehinweise beachten, den Lieferumfang auf Vollständigkeit überprüfen und die Befestigung der beiden Klettbänder zum Halten der Rückenstützen kontrollieren.
-  Gefahr des Verlusts der Verbindungsstabilität von Komponenten und Funktionsverluste.
Empfohlene Anzugsmomente der Befestigungsschrauben sowie die Verwendung der Schraubensicherung LOCTITE 243 beachten.
-  Kippgefahr.
Radstand des Rahmens anpassen, siehe entsprechenden Absatz.
-  Sturzgefahr bei Transfer/Positionswechsel.
Die Räder sind mit den Feststellbremsen zu arretieren.
-  Einklemmgefahr.
Beim Einstellen die Hände nicht zwischen bewegliche Teile halten.
-  Gefahr der fehlerhaften Funktion der Vorrichtung.
Bitte lesen Sie diese Anleitung mit ihren Ausführungen zu den Einstellungsarten und den zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.
- **Zusammenbau und Feinjustierung sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.**
- **Diese Vorrichtung ist in Innenräumen auf glattem, flachem Boden unter der Aufsicht einer dritten Person einzusetzen.**

Aufbau der Vorrichtung

Medizinische Aspekte :

- Diese Vorrichtung ist nicht für hypotone Patienten oder Patienten, die eine komplexe Rumpfhaltung benötigen, bestimmt. Diese Analyse bleibt der Beurteilung durch das paramedizinische Team vorbehalten.
- Es wird empfohlen, dass vor der Verwendung eine medizinische Fachkraft (Ergotherapeut, Orthopädietechniker, Physiotherapeut oder Arzt) die Verwendung des Geräts sowie die Installation validiert.

Technische :

- Ungeeignetes Gewicht und Größe des Patienten: Wenn das Gewicht des Patienten die Tragfähigkeit der rollenden Basis übersteigt oder die Größe des Patienten die Stabilität unsicher macht.
- Verwendung auf geneigtem Boden: Wenn der Boden uneben ist (Gefälle und Schrägen), wird die Verwendung des Rollstuhls aufgrund der Sturzgefahr für den Patienten nicht empfohlen.

- Transport von medizinischen Geräten: Wenn der Rollständer zum Transport von medizinischen Geräten (Sauerstoffflasche, Magenausrüstung usw.) verwendet wird, wird von seiner Verwendung abgeraten, da er über keine geeigneten Befestigungsvorrichtungen verfügt, was die Sicherheit des Patienten und der Geräte gefährden könnte.
- Verwendung in einem motorisierten Fahrzeug: Wenn die fahrbare Basis als Sitz in einem motorisierten Fahrzeug verwendet wird oder in einem Spezialfahrzeug befestigt ist, ist ihre Verwendung verboten. Da sie nicht crashtestgeprüft ist, kann die Sicherheit des Patienten im Falle eines Unfalls nicht gewährleistet werden. Der Transport sollte unbedingt im Kofferraum des Fahrzeugs erfolgen.
- Erschwerter Zugang und Manövrierfähigkeit: Wenn die Lebensumgebung des Patienten (zu Hause, in einer Einrichtung, auf einer öffentlichen Straße) nicht für die Größe und Manövrierfähigkeit des Rollstuhls geeignet ist.
- Exposition in salzhaltiger Umgebung: Wenn der Rollständer in salzhaltiger Umgebung eingesetzt wird, kann es zu vorzeitigen Verschleißerscheinungen kommen, die die Nutzung einschränken und die Haltbarkeit des Rollstuhls beeinträchtigen können.

Einrichten für den ersten Gebrauch

Vor der ersten Benutzung der rollenden Basis müssen unbedingt mehrere Überprüfungen durchgeführt werden, um die Konformität und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

Überprüfung beim Empfang des Produkts

Vergewissern Sie sich bei Erhalt der fahrbaren Basis, dass alle bestellten Teile vorhanden sind:

- Die fahrbare Basis
- Die eventuell bestellten Optionen
- Die Gebrauchsanweisung.

Bei fehlenden Teilen oder Anomalien wenden Sie sich bitte umgehend an den Lieferanten.

Überprüfung der Konformität des Produkts

Überprüfen Sie vor der Installation den allgemeinen Zustand des Geräts :

- Keine sichtbaren Schäden (Risse, gebrochene oder verformte Teile).
- Funktionsfähigkeit der Räder und Bremsen
- Stabilität der Struktur
- Vorhandensein und Konformität der bestellten Optionen.

Installation des Körperstützsystems

- Das Sattelkorsett muss von einer medizinischen Fachkraft installiert werden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Stützsystem sicher an der rollenden Basis zu befestigen.

Montage der Optionen (falls bestellt)

Wenn Optionen ausgewählt wurden, montieren Sie diese gemäß den mitgelieferten Anweisungen.

Abschließende Überprüfungen

Führen Sie vor der ersten Verwendung die folgenden Prüfungen durch:

- Stabilität und Festigkeit der Sattelbefestigung.
- Korrekte Befestigung der installierten Optionen.
- Überprüfen Sie, ob die Räder und Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025


Validierung durch eine Gesundheitsfachkraft

Es wird empfohlen, dass eine medizinische Fachkraft (Ergotherapeut/in, Orthopädietechniker/in, Physiotherapeut/in oder Arzt/Ärztin) die Installation validiert und sicherstellt, dass die Positionierung vor der ersten Verwendung an die Bedürfnisse des Patienten angepasst ist.

Sobald diese Überprüfungen abgeschlossen sind, ist die Rollbasis einsatzbereit.

Zusammensetzung des Geräts

Die Bestandteile der Vorrichtung sind mithilfe der unten aufgeführten Teile gemäß den Anweisungen im Kapitel Gebrauchsinformation zusammenzubauen.

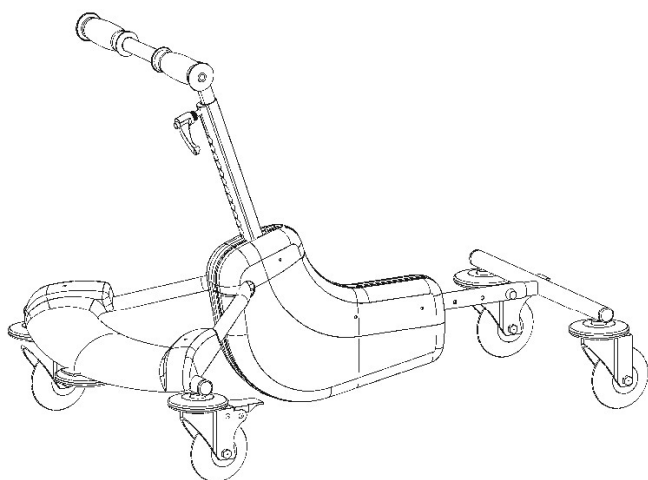


MOTILO Rahmen

T1 : T10K**

T2 : T20K**


** Farben des Gehäuses und des Rahmens

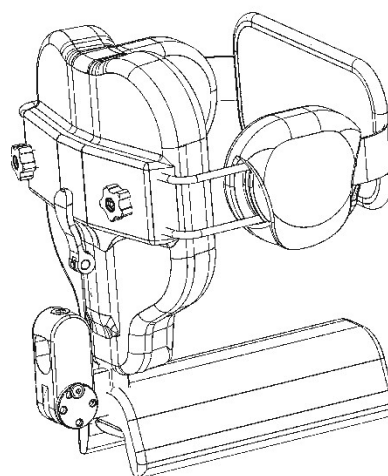


EVO-Sattel

T1 : T00EVO-206-1BL

T2 : T00EVO-206-2BL

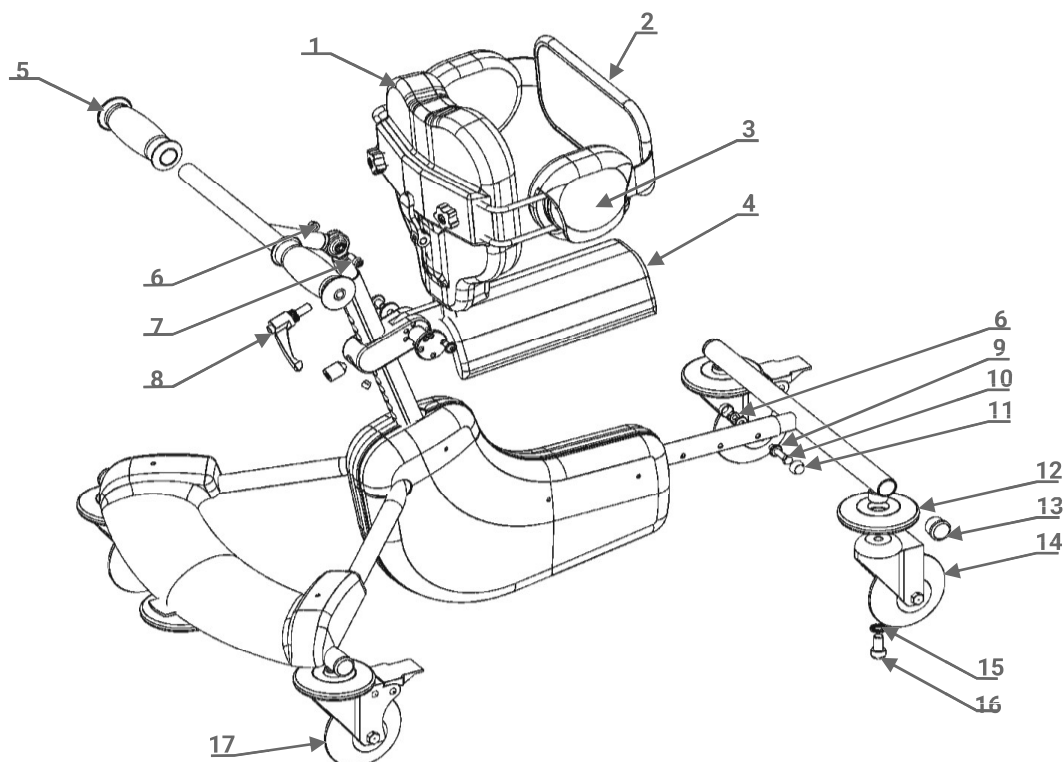


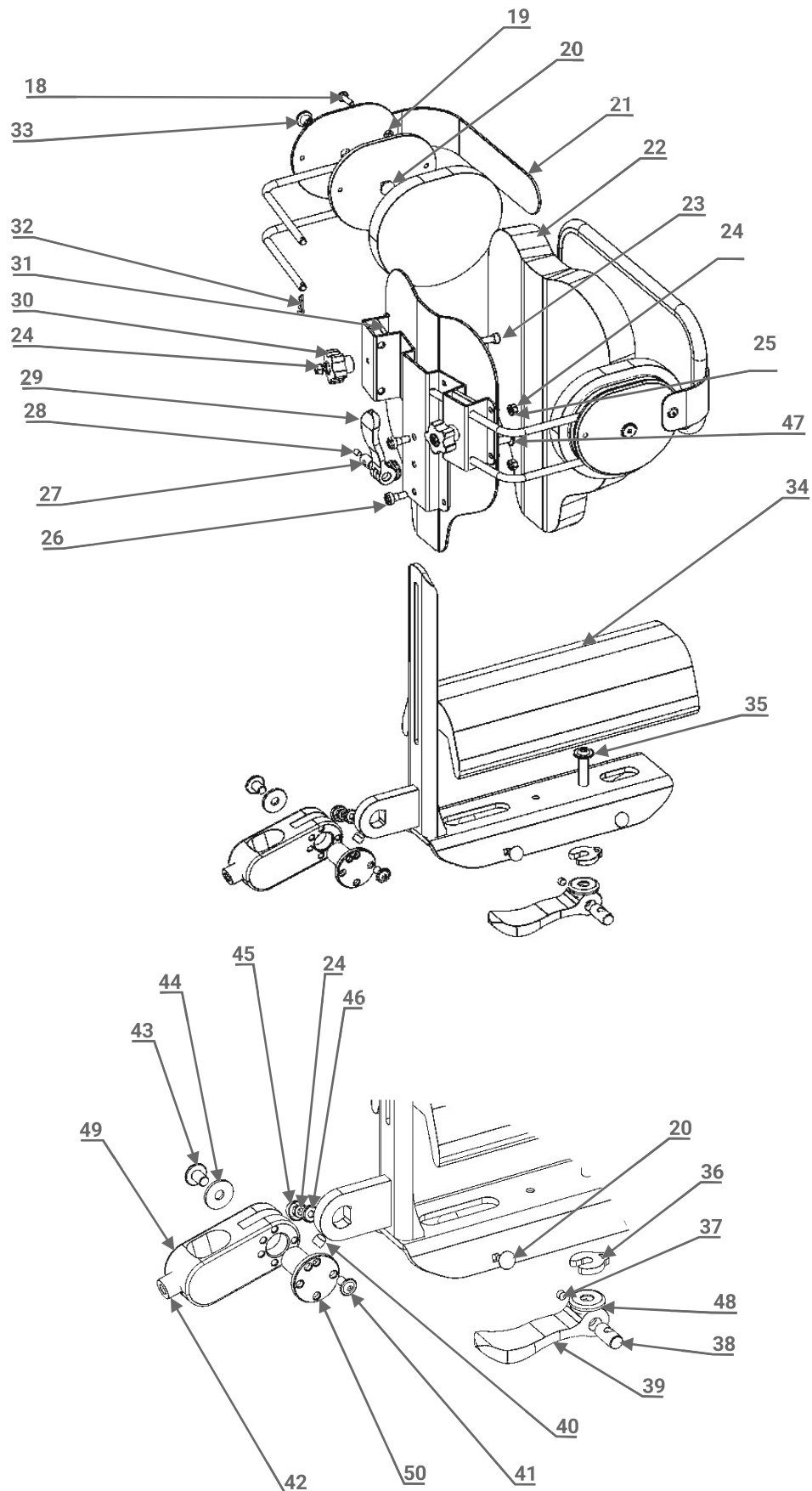


Nr.	Artikelnummer		Bezeichnung
1	T00EVO-107-1		Bezug vorn
2	T00EVO-203-1		Flexible Rückenstütze
3	T00EVO-106-1		Bezug laterale Thoraxpelotte
4	T00EVO-104-1		Sattelbezug
5	T108015		Lenkergriff
6	Vo8F-6		Selbstsichernde Mutter
7	Vo2Z-0616		Innensechskantschraube
8	V31-820		Abnehmbarer Griff
9	V39A-6		Clip-Unterlegscheibe
10	V12-635		Sechskantschraube
11	V39B-6		Clip-Abdeckung
12	T108012		Anschlag
13	V32-2025		Abdeckung
14	T608011-TR		Freilaufende Rolle
15	V22-10		Fächerscheibe
16	Vo2Z-1020		Innensechskantschraube
17	T608010-TR		Bremsrolle
18	Vo6Z-0416		Linsenkopfschraube mit Innensechskant
19	Vo8F-4		Selbstsichernde Mutter
20	V34Z-0512		Schraube mit Vierkantansatz
21	T00EVO-024-1		Gurt
22	T00EVO-019-1		Schaumstoffpelotte vorn
23	V12-535		Kopfschraube
24	Vo8F-5		Selbstsichernde Mutter
25	V20Z-051210		Unterlegscheibe
26	VFABO001-F9A0606		Zentrierschraube
27	V0032l-060915		Nockensperrachse
28	V03Pl-0406		Feststellschraube
29	V48F-6		Hebel mit Einrastfunktion
30	V30FO-532		Rändelrad Innengewinde
31	T00EVO-026-1		Flansch
32	VWURTo01-ISS01220		Federstecker
33	V79l-01-0509		Hülsenmutter
34	T00EVO-018-1		Schaumstoffpolster Sattel
35	Vo6Z-0835		Linsenkopfschraube mit Innensechskant
36	T00EVO-017-1		Passscheibe
37	V03Pl-0606		Feststellschraube
38	V0032l-081124		Nockensperrachse
39	V48F-8		Hebel mit Einrastfunktion
40	V03Z-0808		Madenschraube
41	Vo6Z-0612		Linsenkopfschraube mit Innensechskant
42	T1 : V03P-1625	T2 : V03P-1630	Feststellschraube
43	Vo6Z-0812		Linsenkopfschraube mit Innensechskant
44	V20Z-082402		Unterlegscheibe
45	V39B-5		Clip-Verschluss
46	V39A-5		Clip-Unterlegscheibe
47	Vo6Z-0625		Linsenkopfschraube mit Innensechskant
48	V48CF-8		Gebogene Unterlegscheibe
49	T1 : T102001	T2 : T202001	MOTILO Sattelmuttern
50	T1 : T102002	T2 : T202002	MOTILO Gelenkachse

Zubehör


Es sind verschiedene Zubehörteile für MOTILO EVO aus der JANTON-Reihe erhältlich. Die Vertriebsabteilung von JANTON berät Sie gerne.

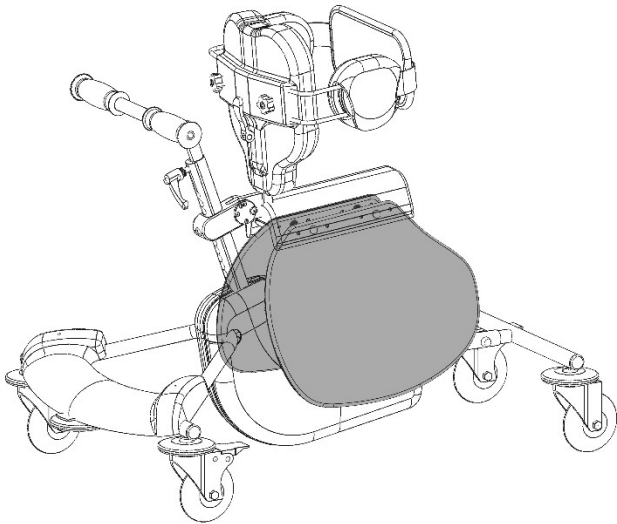


Beinseparator
(Gewicht 1 150 gr.)
T00EVO-204-1

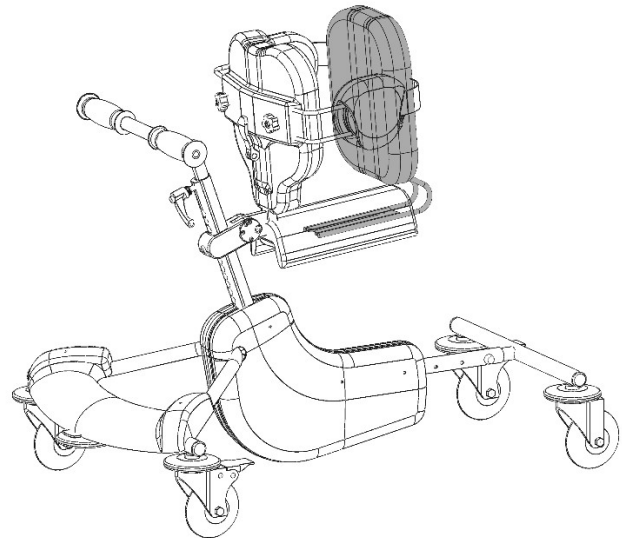


Starre Rückenstütze
(Gewicht 1 220 gr.)
T00EVO-207-1

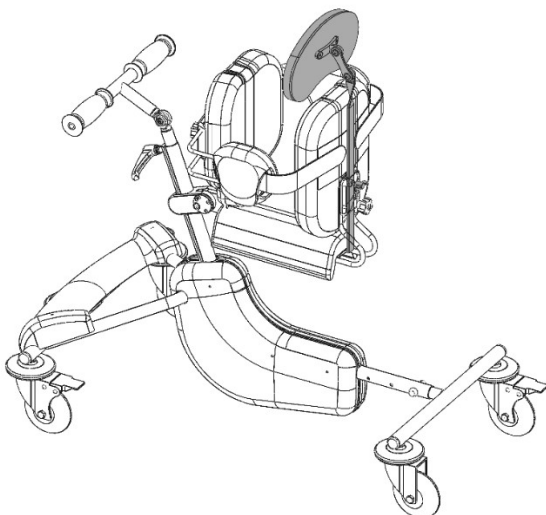


Kopfstütze*
**Nur zusammen mit starrer Rückenstütze verwendbar*
(Gewicht 440 gr.)
T00EVO-205-1AL205

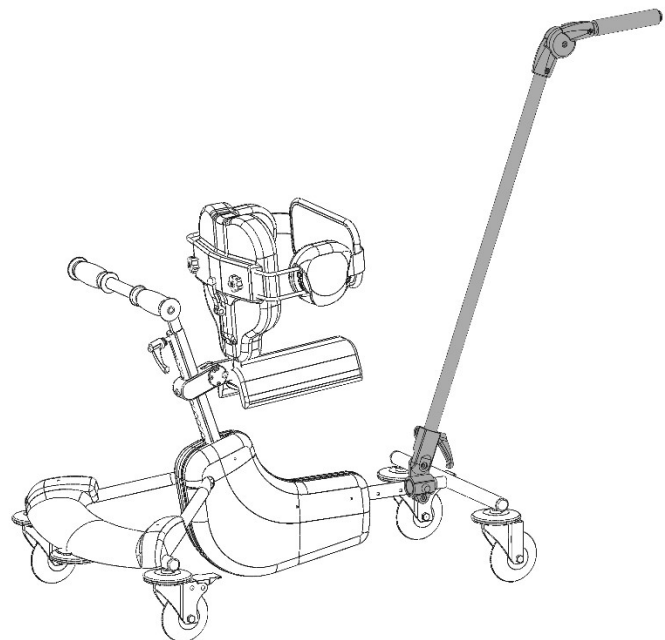

Schiebestange
(Gewicht 820 gr.)
T0060

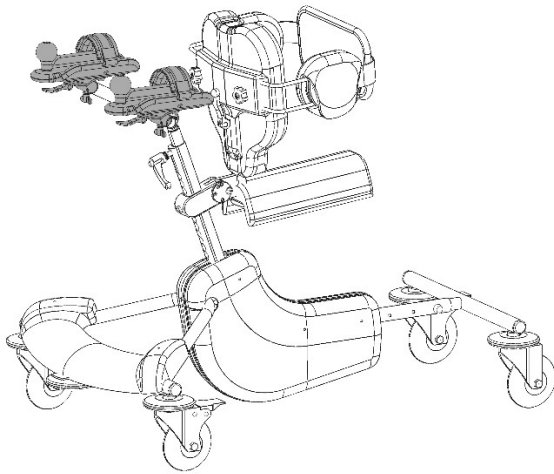

Armauflagenpaar
Toogo-K1 (Gewicht 1 080 gr.)
Toogo-K2 (Gewicht 1260gr.)

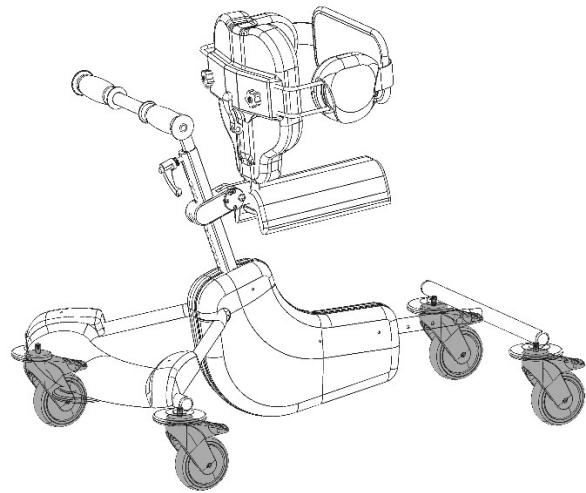

Räder mit Lenkstopp
(Gewicht 1 730 gr.)
T0021-2


Gebrauchsanweisung

Anbringung des Sattelkorsetts am Rahmen:


Diese beiden Bestandteile werden getrennt geliefert.

Montieren Sie den EVO-Sattel wie im Folgenden beschrieben auf dem Rahmen:

- 1- Griff (8) lösen und abnehmen.
- 2- Lenker abnehmen.
- 3- Sattelnuss auf 60 °, 70 °, 75 ° oder 90 ° ausrichten (siehe Kapitel „Einstellung der Sattelneigung“ auf Seite 11.)
- 4- Sattel auf den Rahmen setzen und seine Position mit der Gewindestiftschraube (42) (22 Nm Anzugsmoment und LOCTITE 243 Schraubensicherung) fixieren.
- 5- Lenker wieder montieren und seine Position mit dem Griff (8) fixieren.

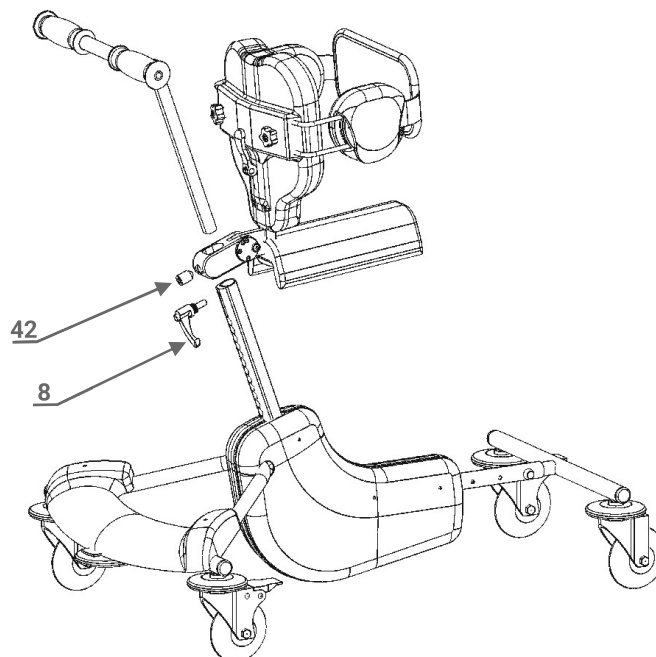

⚠ Die Gewindestiftschraube muss in einer Vertiefung der Zahnstange sitzen.

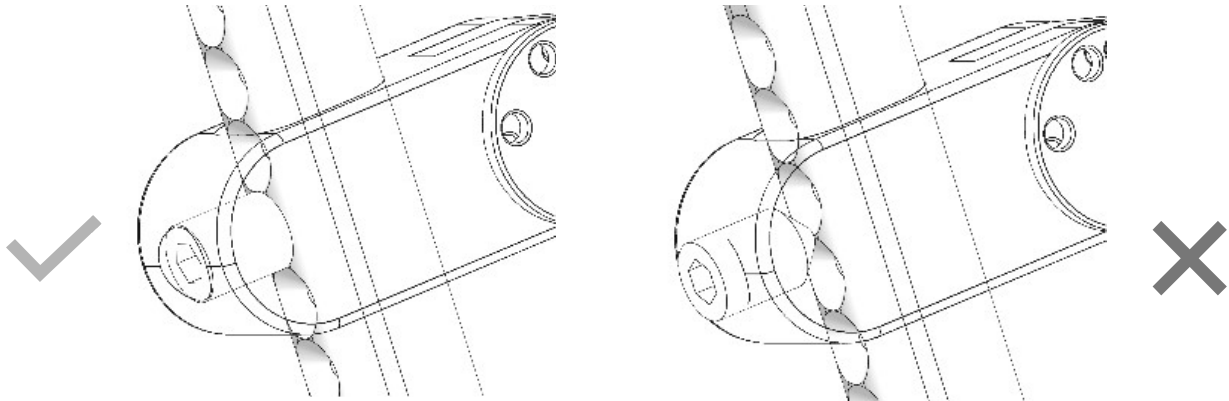


⚠ Der abnehmbare Griff muss auf der flachen Seite des Lenkers aufliegen.

⚠ Die Höhe und die Neigung des Sattelkorsetts sind unbedingt ohne den Patienten auf der Vorrichtung einzustellen.

Patienten auf die Vorrichtung setzen:

Um den Patienten auf die Vorrichtung zu setzen,

- werden die Gurte (21) und die flexible Rückenstütze (2) entfernt,
- wird der Patient auf den Sattel gesetzt,
- werden die flexible Rückenstütze und die Gurte wieder angebracht unter Beachtung des optimalen Halts des Patienten durch das System und
- wird die Position der lateralen und der vorderen Pelotten angepasst.

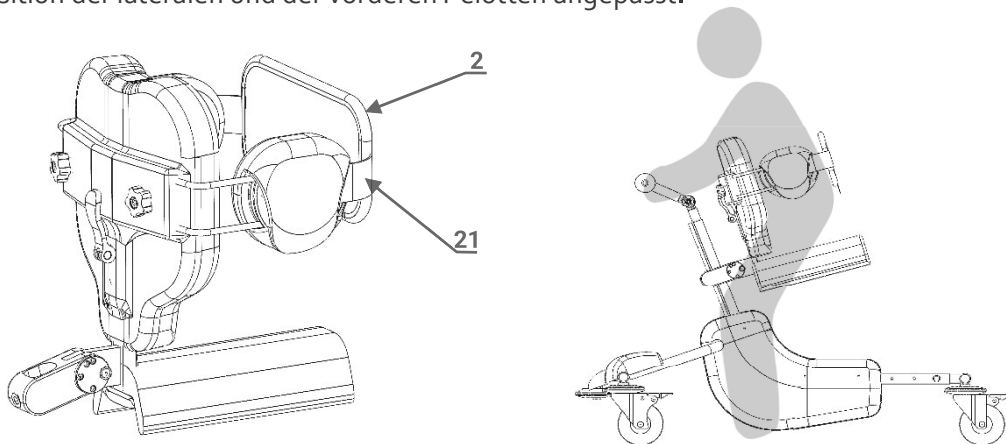


⚠ Es ist wichtig, die Einstellungen zu kontrollieren und anzupassen, damit sie dem Körperbau und dem klinischen Zustand des Patienten entsprechen.

⚠ Die Gurte sind unverzichtbar und garantieren den sicheren Halt des Patienten.

Patienten auf die Vorrichtung mit optionaler Rückenstütze setzen:

Um den Patienten auf die Vorrichtung zu setzen, wird empfohlen, die Rückenstütze abzunehmen.
Dazu

- Hebel (39) lösen und die Rückenstütze herausschieben,
- den Patient auf den Sattel setzen,
- Rückenstütze wieder einsetzen und ihre Position durch Verriegeln des Hebels fixieren,
- Gurte (21) befestigen, die die lateralen Stützen mit der Rückenstütze verbinden.

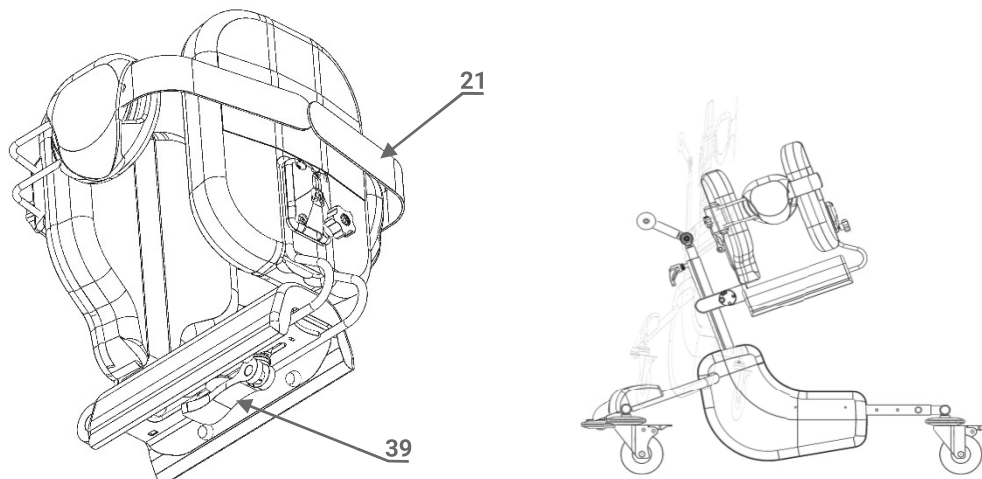


⚠ Es ist wichtig, die Einstellungen zu kontrollieren und anzupassen, damit sie dem Körperbau und dem klinischen Zustand des Patienten entsprechen.

⚠ Die Gurte sind unverzichtbar und garantieren den sicheren Halt des Patienten.

Einstellung der Rahmenlänge:

Die Rahmenlänge ist einstellbar, um dem Patienten ein sicheres Gehen zu ermöglichen. Hierfür kann die Position der Hinterachse des Fahrgestells angepasst werden.

Zum Anpassen der Position der Hinterachse Kunststoffkappen (11) und dann die selbstsichernde Mutter (6) und die Schraube (10) abnehmen. Position einstellen und anschließend in der gewünschten Position wieder mit den Befestigungsteilen montieren.

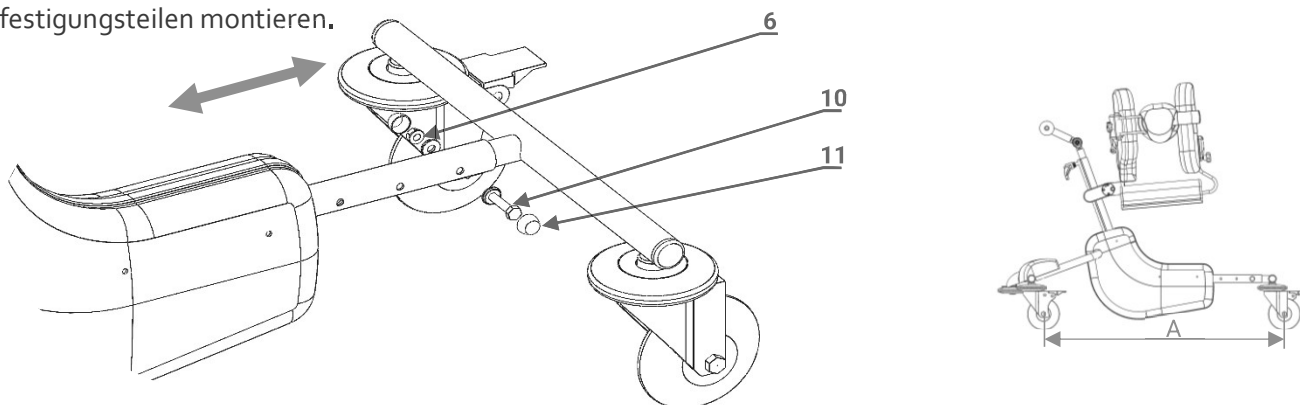


	Position 1	Position 2	Position 3
T1	A = 765 mm	A = 815 mm	A = 865 mm
T2	A = 900 mm	A = 950 mm	A = 1000 mm

Einstellung des Lenkers:

Der Lenker ist in Höhe und Neigung verstellbar und kann an die Arme des Patienten angepasst werden.

Die Höhe wird durch Lösen des abnehmbaren Griffs (8) verstellt. Lenkerposition einstellen und abnehmbaren Griff wieder anziehen.

Die Neigung wird durch Lösen der Schraube (7) mit einem 5 mm-Inbusschlüssel verstellt. Schraube lösen, den Neigungswinkel einstellen, dann wieder festziehen.

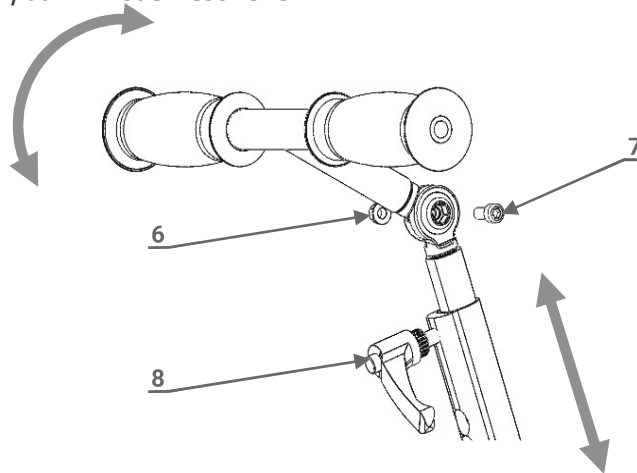


⚠ Bitte achten Sie darauf, die Mutter (6) nicht zu verlieren.

Sattelhöheneinstellung für den Patienten:




MOTILO EVO bietet mehrere Befestigungspositionen des Sattels, mit denen der Abstand zwischen Boden und Schritt des Patienten optimal eingestellt werden kann.

Die Sattelhöhe wird verstellt, indem die Schraube (42) mit einem 8 mm-Inbusschlüssel aus ihrem Sitz entfernt wird. Die Nuss auf die gewünschte Höhe schieben, dann die Schraube (42) mit einem Anzugsmoment von 22 Nm und Schraubensicherung LOCTITE 243 festziehen.

⚠ Diese Einstellung ist unbedingt ohne den Patienten auf der Vorrichtung vorzunehmen.

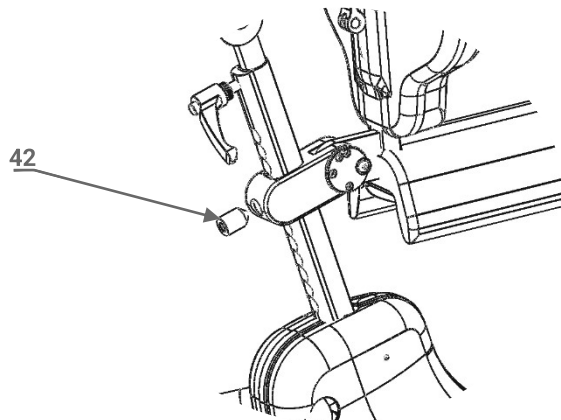

⚠ Die Gewindestiftschraube muss in einer Vertiefung der Zahnstange sitzen.

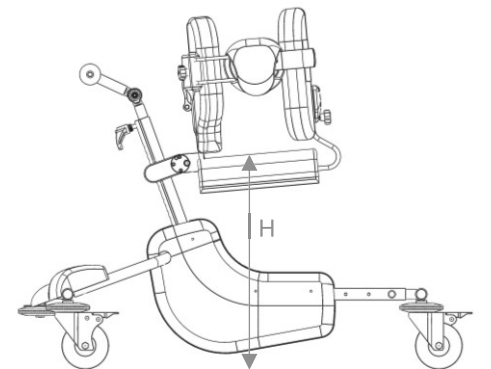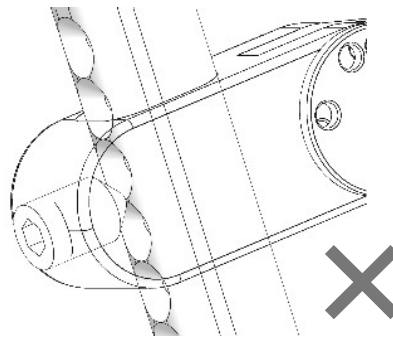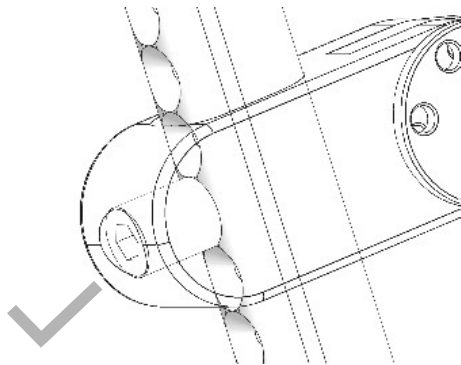

Höhe Boden / Schritt:
T1 : 360 mm bis 515 mm
T2 : 495 mm bis 650 mm

Anzahl Positionen: 12

Einstellung der Neigung des Patienten:

Der Einstellungsmechanismus verfügt über vier Positionen in verschiedenen Winkeln. Die aufrechte Haltung des Patienten im Laufe der Lauflernzyklen ist nach und nach anzustreben.



⚠ Achtung: Für eine optimale Stabilität bei der Fortbewegung des Kindes darf der Beugewinkel der Hüfte nicht mehr als 15° betragen. Dazu muss die Höhe des Sattelkorsetts korrekt eingestellt werden.

⚠ Diese Einstellung ist unbedingt ohne den Patienten auf der Vorrichtung vorzunehmen.

Die Neigung wird durch Lösen der Schraube (43) mit einem 5 mm-Inbusschlüssel und durch Entfernen der Schraube (41) mit einem 4 mm-Inbusschlüssel verstellt.

Schraube (41) mit einem Anzugsmoment von 8 Nm in der gewünschten Position wieder einschrauben und mit Loctite 243 fixieren.

Zum Abschluss die mit Loctite 243 versehene Schraube (43) mit einem Anzugsmoment von 13 Nm festziehen.

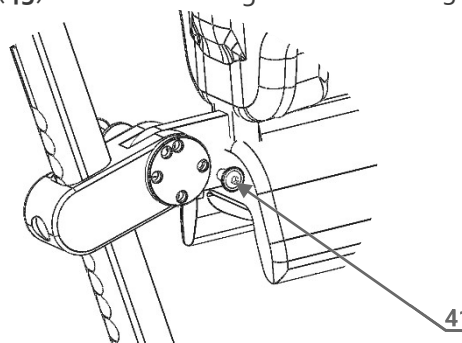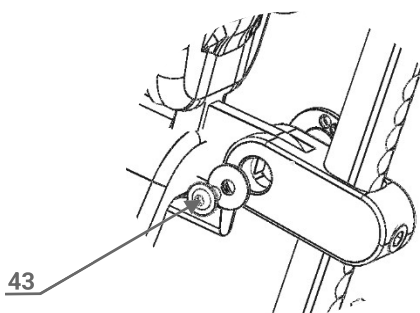


MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

Die Positionen werden im Weiteren aufgeführt.


Die Neigung muss schrittweise an die Entwicklung des Kindes angepasst werden.

Die anfängliche Position muss vom Orthopädietechniker (oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachkraft) auf den Patienten abgestimmt werden.

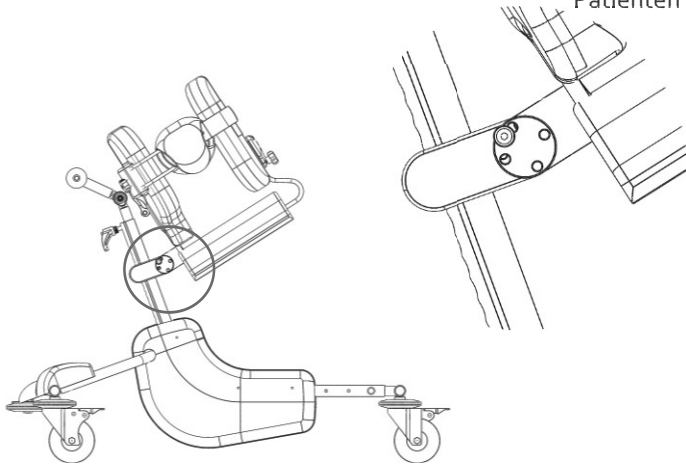


Position 1: ca. 60°

Position 2: ca. 70°

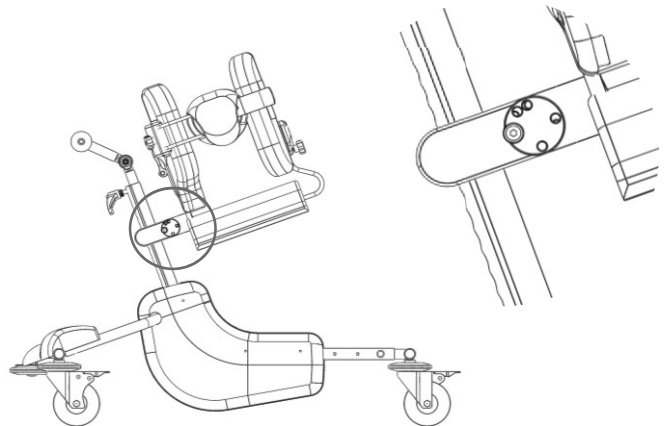


Position 3: ca. 75°

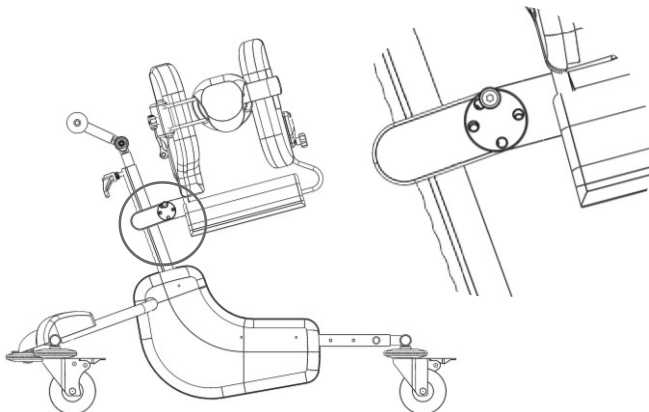

Position 4: ca. 90°

Angestrebte endgültige Position in der Rehabilitation von Kindern mit infantiler Zerebralparese

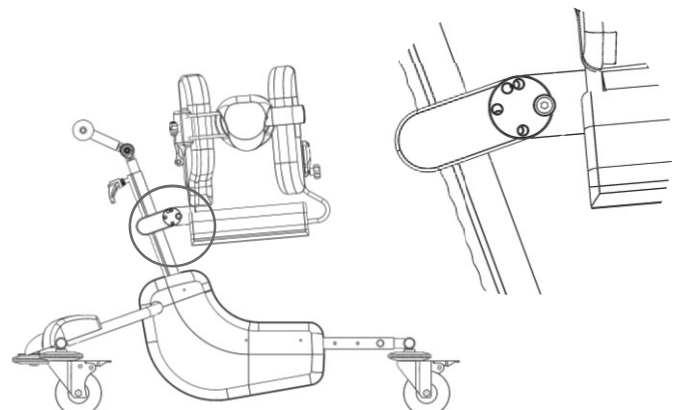


Einstellung der vorderen Pelotte:


Durch die Höheneinstellung der vorderen Stütze passt sich das Gestell den verschiedenen Rumpflängen an.

Einstellbereich EVO-Sattel = 275 mm bis 385 mm

Zur Höheneinstellung der Stütze Hebel (29) lösen, Stütze auf die gewünschte Höhe schieben und Hebel wieder verriegeln.

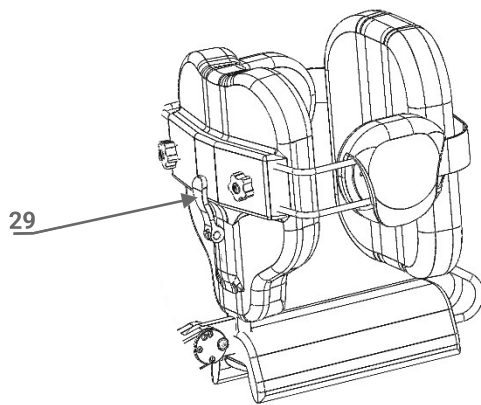

Min. 285 mm
Max. 390 mm

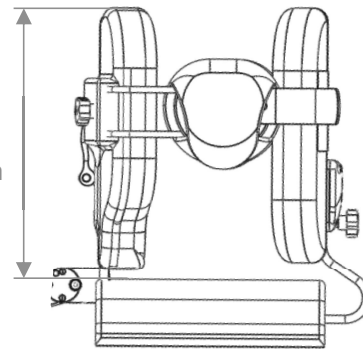



Einstellung der lateralen Thoraxpelotten:

Die lateralen Pelotten können auf verschiedene Weise eingestellt werden.

Mit der Abstandseinstellung passen sie sich verschiedenen Rumpfbreiten an und mit der Kombieinstellung von Höhe/Tiefe/Neigung wird die Position der beiden Pelotten einzeln angepasst.

Zur Einstellung der Rumpfbreite die beiden Rändelräder (30) lösen, die Stützen in die gewünschte Position schieben und die Rändelräder wieder festziehen.

⚠ Achtung: Ein Arretierstift begrenzt den Verstellweg der lateralen Stützen. Er darf nicht entfernt werden, damit die vom Hersteller festgesetzten Beschränkungen nicht überschritten werden.

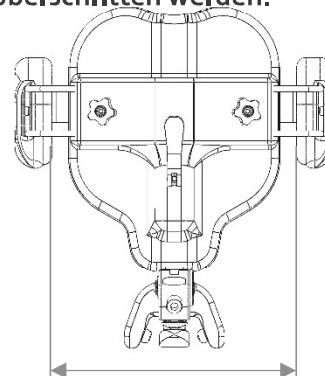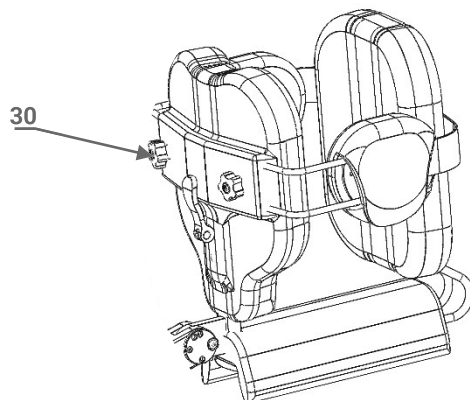


Min. 170 mm
Max. 275 mm

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025


Zur Positionseinstellung der lateralen Pelotten Bezug durch Lösen der beiden Druckknöpfe an der Unterseite öffnen. Mutter (33) mit einem 4 mm-Inbusschlüssel lösen. Höhen-, Tiefen- und Neigungseinstellungen vornehmen und die Position durch Festziehen der Mutter fixieren.

Nach der Einstellung Bezug schließen.

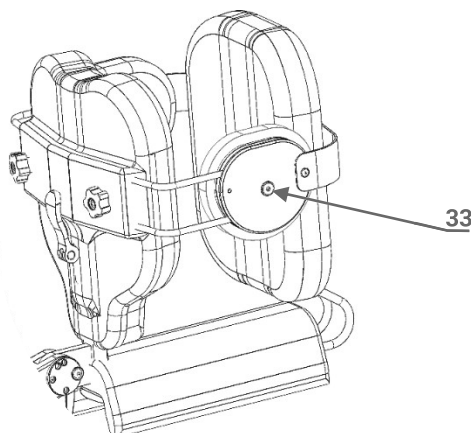

Montage und Einstellung der optionalen starren Rückenstütze:

Aufbau:

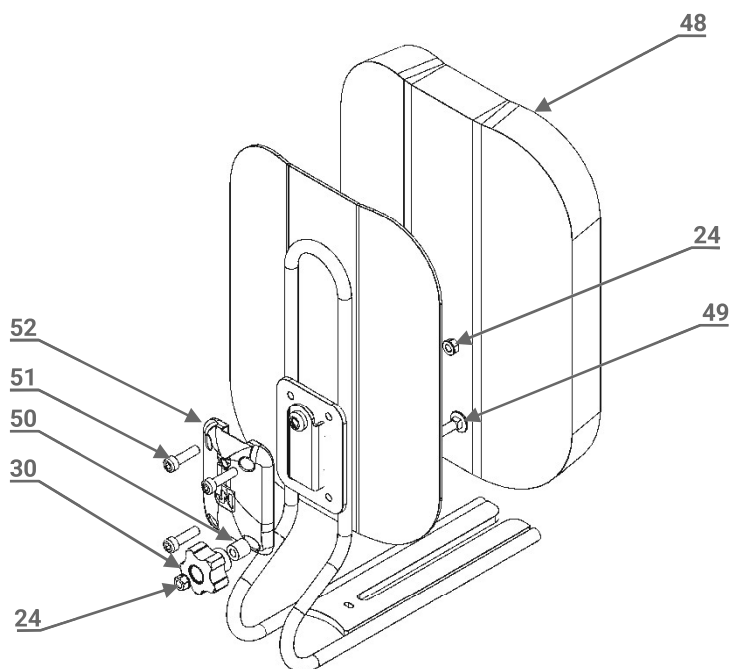

Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung
47	T00EVO-105-1	Bezug der Rückenstütze (nicht abgebildet)
48	T00EVO-020-1	Schaumstoffpolster der Rückenstütze
49	V34ITF-0545	Schraube mit Vierkantansatz
50	V49L-510	Glattes Distanzstück
51	V02Z-0520	Innensechskantschraube
52	T00EVO-016-1	Abdeckung

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

Zusammenbau:

Hebel (39) lösen, um die Passscheibe (36) durch Hebeln mit einem Flatschraubendreher zu entfernen.



Rückenstütze einsetzen und ihre Position durch Verriegeln des Hebels (39) fixieren.

Einstellungen:



Tiefe und Höhe der Rückenstütze einstellbar

Für die Tiefeneinstellung Hebel (39) lösen und Rückenstütze verschieben.



Hebel (39) verriegeln und die Einstellung fixieren.

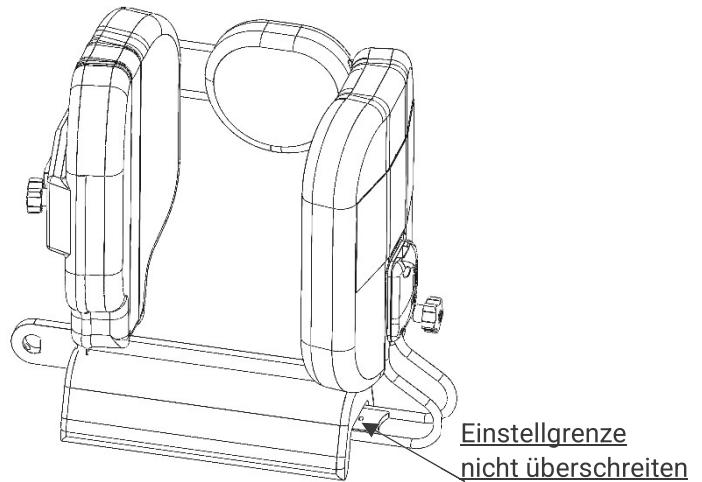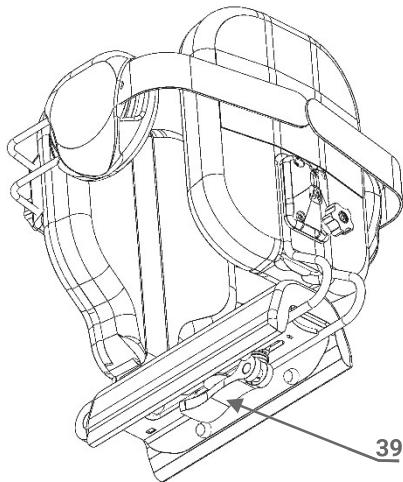

! Achtung: Zulässige Einstellgrenze nicht überschreiten.

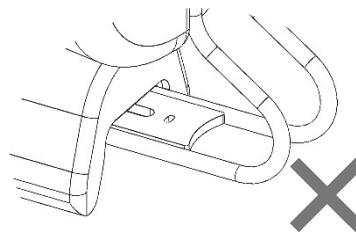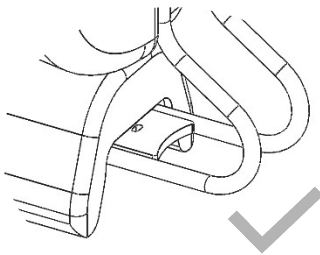


Zur Höheneinstellung der Rückenstütze Rändelrad (24) lösen und Rückenstütze verschieben. Position durch Festziehen fixieren.

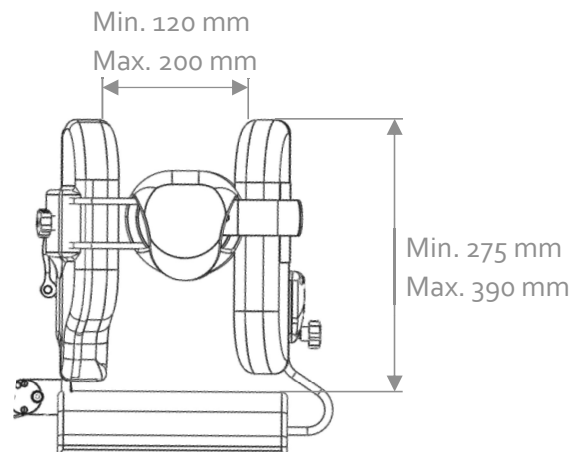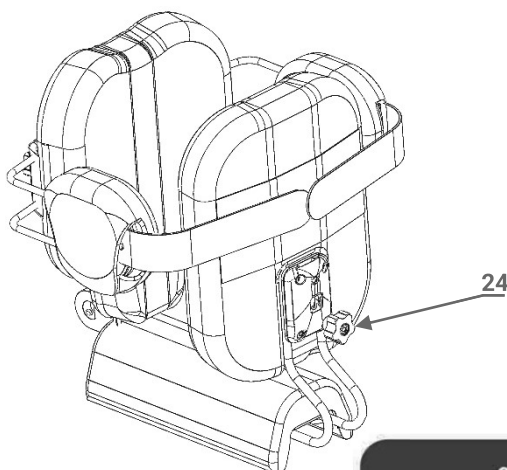

Montage und Einstellung des optionalen Beinseparators:

Aufbau:

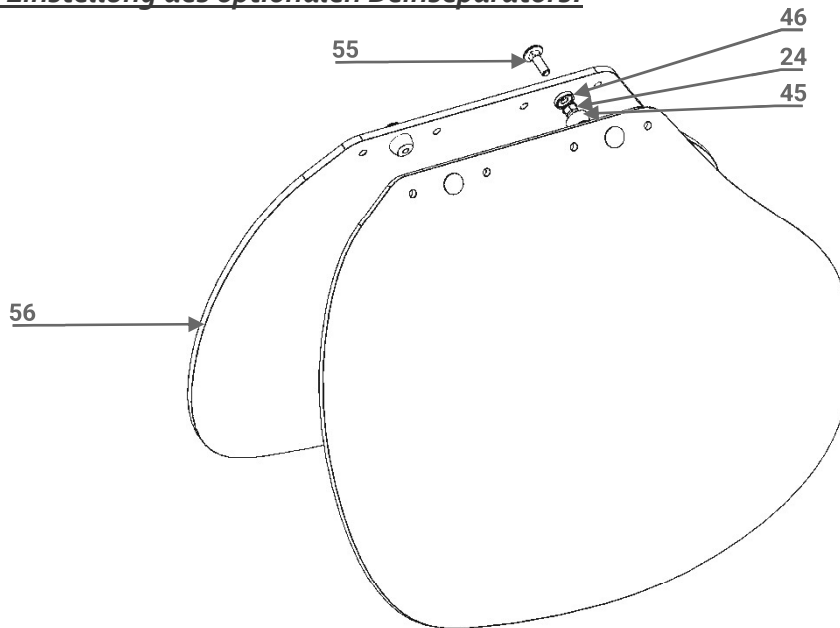


Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung
53	T00EVO-109-G1N	Bezug des Beinseparators links (nicht abgebildet)
54	T00EVO-109-D1N	Bezug des Beinseparators rechts (nicht abgebildet)
55	V34I-0518	Schraube mit Vierkantansatz
56	T00EVO-011-1	Platte des Beinseparators

Zusammenbau:

Mit einem Flachschraubendreher die Stopfen (45) unter dem Sattel entfernen.
Muttern (24) lösen.
Schrauben (20) durch Schrauben (55) ersetzen.
Die Beinseparatoren in den gewünschten Positionen einsetzen.
Muttern (24) anziehen, dabei die Unterlegscheiben (46) nicht vergessen.
Zum Schluss die Stopfen (45) aufstecken.

Einstellungen (3 Positionen):


Mit einem Flachschraubendreher die Stopfen (45) unter dem Sattel entfernen.
Muttern (24) lösen.
Die Beinseparatoren in den gewünschten Positionen einsetzen.
Muttern (24) anziehen, dabei die Unterlegscheiben (46) nicht vergessen.
Zum Schluss die Stopfen (45) aufstecken.

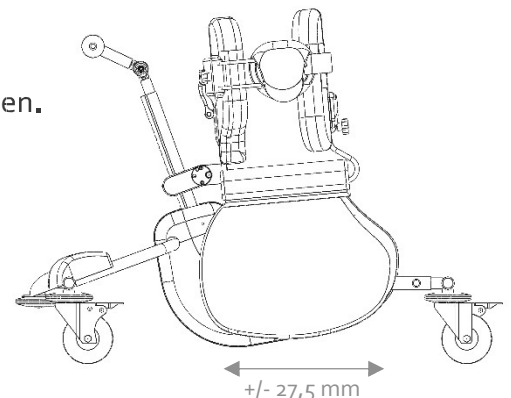

Montage und Einstellung der optionalen Kopfstütze:

⚠ Achtung: Zubehör nur zusammen mit optionaler starrer Rückenstütze zu verwenden.


Aufbau:

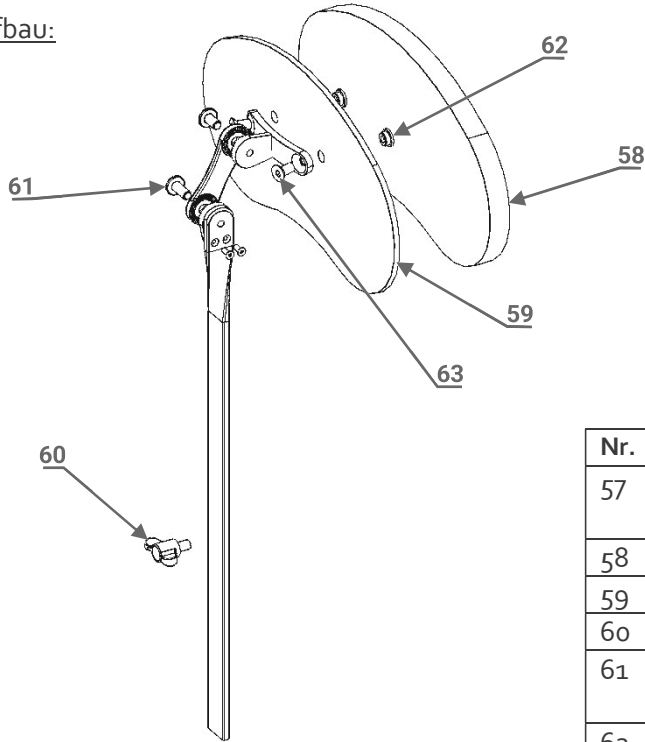

Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung
57	T00EVO-110-1N	Bezug der Kopfstütze (nicht abgebildet)
58	T00EVO-023-1	Schaumstoffpolster Kopfstütze
59	T00EVO-022-1	Platte Kopfstütze
60	V30P-610	Flügelmutter
61	Vo6Z-0616	Linsenkopfschraube mit Innensechskant
62	Vo155BC	Rändelmutter
63	Vo5I-0612	Senkschraube mit Innensechskant


Zusammenbau:

Kopfstütze in die gewünschte Position bringen und sie mit der Flügelmutter (60) fixieren.

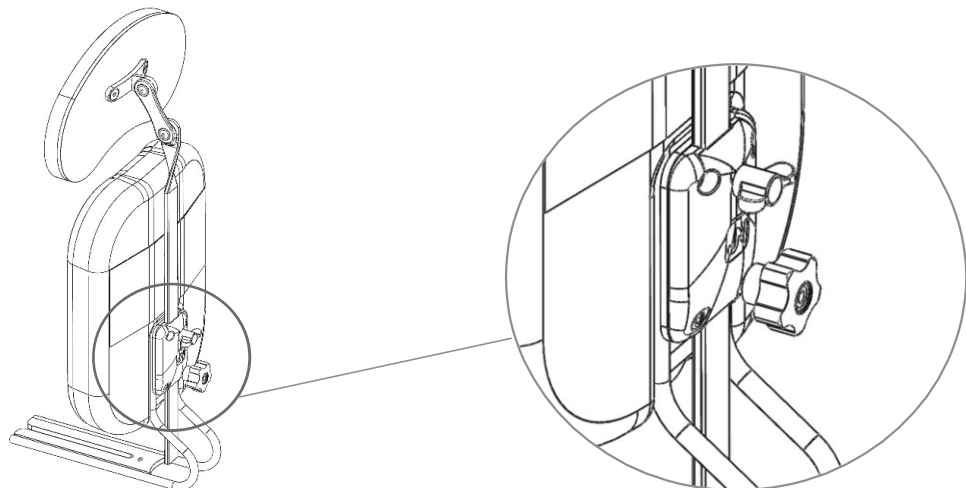

Einstellungen:

Gebrauchsanleitung NT_T8A hinzuziehen.

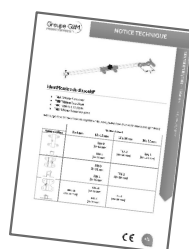

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025


Montage der optionalen Schiebestange:

Gebrauchsanleitung NT_Too60 hinzuziehen.



Montage des optionalen Armauflagenpaars:

Gebrauchsanleitung NT_Too90 hinzuziehen.

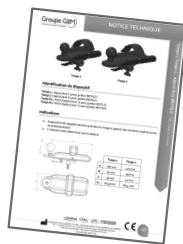

Montage der optionalen Räder mit Lenkstopp:

Gebrauchsanleitung NT_Too21 hinzuziehen.



Instandhaltung

Lagerung

Den Artikel geschützt vor Feuchtigkeit mit seiner Produktionsnummer lagern.

Reinigung

Die Reinigung der mechanischen Teile erfolgt manuell mit warmem Wasser. Die Verwendung eines milden, chlorfreien Lösungsmittels ist möglich. Vor der Wiederverwendung trocknen lassen.

Die Bezüge sind abnehmbar und können bei 30 °C mit einem milden, chlorfreien Reinigungsmittel gewaschen werden.

Nicht zulässig:



- Chemische Reinigung
- Verwendung von Bleichmitteln
- Im Trockner trocknen.

Bei starker Abnutzung können die Bezüge einzeln ausgetauscht werden.

MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025


Desinfektion

Das Produkt muss zuvor gereinigt und frei von Rückständen oder Verschmutzungen sein.

Zwischen zwei Patienten, die das Produkt nacheinander verwendet haben, muss es manuell mit einer 70%igen Isopropylalkohollösung desinfiziert werden.

Abziehen des Bezugs von der vorderen Pelotte:

1. Reißverschlüsse öffnen.
2. Stifte entfernen.
3. Laterale Thoraxpelotten herausziehen.
4. Rändelräder fest anziehen.
5. Selbstsichernde Muttern mit einem 8 mm-Maulschlüssel entfernen.
6. Rändelräder entfernen.
7. Bezug abziehen.

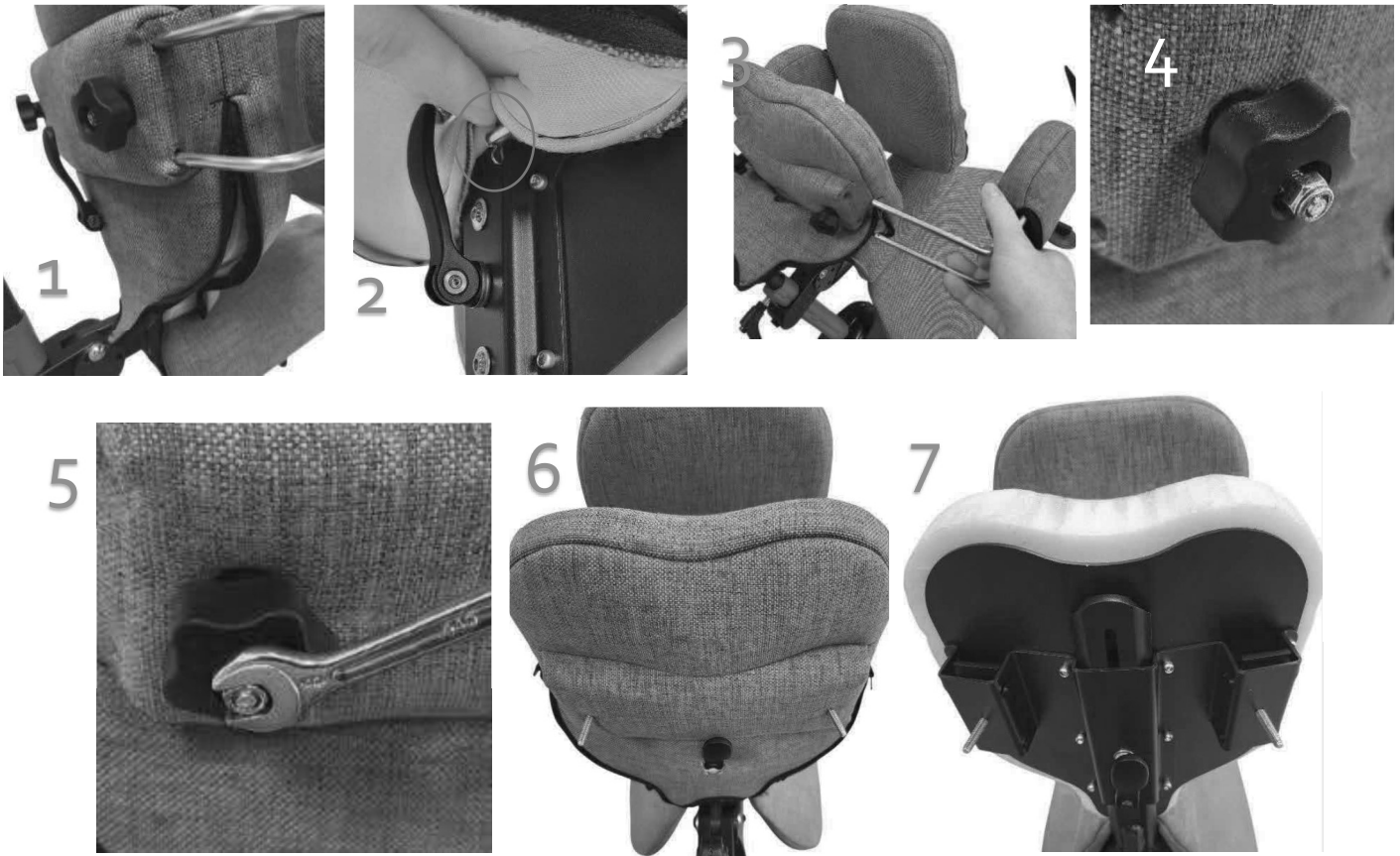

Bezug wieder anbringen:

- Bezug auf die Pelotte ziehen.
- Rändelräder fest anziehen.
- Selbstsichernde Muttern ansetzen und festschrauben, bis sie mit den Schraubenenden bündig sitzen (8 mm-Maulschlüssel).
- Rändelräder lösen, um die Durchführung der Halterungen der lateralen Thoraxpelotten freizugeben.
- Laterale Pelotten einsetzen.
- Stifte am Halterungsende einsetzen.
- Reißverschlüsse des Bezugs schließen.


MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

Abziehen des Bezugs von den lateralen Thoraxpelotten:

- Die beiden Druckknöpfe unter dem Bezug öffnen, um ihn abzuziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder beziehen.

1

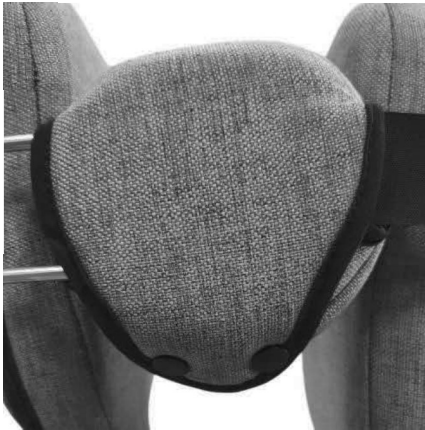

2



3



Abziehen des Sattelbezugs:

- Mit einem Flachsraubendreher die Stopfen entfernen.
- Muttern entfernen.
- Bezug abziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder beziehen.

1



2



3



MOTILO EVO - Lauflernhilfe

NT_ T00EVO_v5_10/2025

Abziehen des Bezugs der starren Rückenstütze:

- Die beiden Reißverschlüsse öffnen, um den Bezug abzuziehen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder beziehen.



Abziehen des Beinseparatorbezugs:

- Zum Abziehen des Bezugs Beinseparator nach den Anweisungen im Absatz **Einstellungen, S. 17** der Gebrauchsanleitung abmontieren.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder beziehen.

Abziehen des Kopfstützenbezugs:

- Zum Abziehen des Bezugs die beiden Druckknöpfe öffnen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder beziehen.

Wartung

Es wird empfohlen, die Vorrichtung mindestens zweimal jährlich (der Zeitrahmen richtet sich nach dem Patienten) auf Funktionstüchtigkeit und Verschleiß durch einen Orthopädietechniker oder durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal zu prüfen. Checkliste:

- auf Vollständigkeit (alle Komponenten wie Schrauben, Räder usw. vorhanden),
- Griffe und Bewegungselemente auf Funktion überprüfen,
- auf Beschädigungen der Befestigungen, Risse oder Brüche,
- Räder und Bremssysteme auf Funktion,
- Verstell- und Befestigungselemente auf Funktion überprüfen,
- Endkontrolle der allgemeinen Funktion der Vorrichtung.

Die Begleitpersonen des Patienten sollen darauf hingewiesen werden, den Rahmen einer Sichtkontrolle vor dem Einsatz zu unterziehen:

- keine materielle Beschädigung (Risse, Brüche),
- Vollständigkeit (alle Komponenten wie Schrauben, Räder usw. vorhanden)
- auf jeden Funktionsverlust achten.

 Fehler oder Beschädigungen, die vom Orthopädietechniker oder Begleitpersonen festgestellt wurden, müssen dem Hersteller gemeldet und vor dem nächsten Einsatz behoben werden.

Verbrauchsmaterial

Einige Komponenten können sich abnutzen. Während der Nutzungsdauer Ihrer Vorrichtung ist es möglich, dass diese Komponenten ausgetauscht werden müssen. Zur Bestellung von Ersatzteilen und für Informationen zum Austausch wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

Entsorgung

Bei der Entsorgung des Geräts sind die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften für die Abfalltrennung zu beachten.

Wiederverwendung

Dieses Produkt und sein Zubehör können wiederverwendet werden.

Vor einem Benutzerwechsel sollten Sie das Gerät überprüfen und die folgenden Schritte durchführen:

Reinigen und Desinfizieren

Beziehen Sie sich auf das entsprechende Kapitel.

Überprüfung der Konformität des Produkts

Überprüfen Sie vor der Installation den allgemeinen Zustand der Vorrichtung:

- Keine sichtbaren Schäden (Risse, gebrochene oder verformte Teile).
- Funktionsfähigkeit der Räder und Bremsen
- Stabilität der Struktur
- Vorhandensein und Konformität der erforderlichen Optionen.

Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen oder Auffälligkeiten sofort an den Lieferanten.

Einstellen der Vorrichtung

Stellen Sie die Position des Sattels, auf die Morphologie des Patienten ein. Diese Einstellung sollte von einer medizinischen Fachkraft vorgenommen werden (siehe das entsprechende Kapitel).

Stellen Sie die verschiedenen Optionen und Elemente der fahrbaren Basis entsprechend den Bedürfnissen des Patienten sowie den von der medizinischen Fachkraft festgelegten Therapiezielen ein.

Stellen Sie sicher, dass die Größen- und Gewichtsgrenzen des neuen Benutzers innerhalb der zulässigen Grenzwerte des Produkts liegen.

Abschließende Überprüfungen

Führen Sie die folgenden Kontrollen durch:

- Stabilität und Festigkeit der Sattelbefestigung.
- Sichere Befestigung der installierten Optionen.
- Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Räder und der Bremsen.

Validierung durch eine Gesundheitsfachkraft

Es wird empfohlen, dass eine medizinische Fachkraft (Ergotherapeut/in, Orthopädietechniker/in, Physiotherapeut/in oder Arzt/Ärztin) die Installation validiert und sicherstellt, dass die Positionierung den Bedürfnissen des Patienten entspricht, bevor sie wieder verwendet wird.

Sobald diese Überprüfungen abgeschlossen sind, kann die Rollbasis wieder verwendet werden.

Gewährleistung und Haftung

Für die Vorrichtung gilt bei bestimmungsgemäßer Verwendung gemäß den Herstelleranweisungen ab dem Kaufdatum die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Der Hersteller ist haftbar, sofern die Vorrichtung gemäß den in dieser Dokumentation beschriebenen Empfehlungen eingesetzt wird. Bei Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen oder bei unbefugt an der Vorrichtung vorgenommenen Änderungen schließt der Hersteller jede Haftung aus.


Jeder Reklamation ist ein korrekt ausgefüllter Rücksendeschein beizufügen. Unvollständige Formulare können nicht bearbeitet werden.

Gesetzliche Informationen

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1. JANTON erklärt in seiner Eigenschaft als Hersteller, dass es den Anforderungen der Verordnung 2017/745 (EU) entspricht.

Alle Vorkommnisse mit der Vorrichtung müssen JANTON gemeldet werden. Alle mit der Vorrichtung auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung müssen JANTON und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Beispiel für die Beschriftung dieser Gerätereferenz :

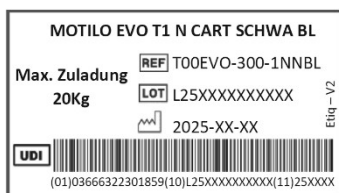

Symbole

	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller		Allgemeines Warnzeichen
	Katalognummer		Siehe Handbuch/Gebrauchsanweisung
	CE-Kennzeichnung		Dieses Symbol ist mit dem Namen und der Adresse des Übersetzungsunternehmens zu versehen.
	Nr. der Produktionscharge		Waschtemperatur °C
	Eindeutige Geräteidentifikation		Kein Bleichmittel
	Chemische Reinigung verboten		Bügeln verboten
	Wäschetrockner verboten		Unterstützung, die für Gehörlose und Schwerhörige geeignet ist
	Unterstützung geeignet für blinde und sehbehinderte Menschen		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



168 Z.A. des Aubrières
49412 Saumur Cedex, Frankreich
+33 (0)2 41 50 50 91
info@janton-solutions.com

janton-solutions.com